

STOCKAGE ET NETTOYAGE DES COUVERTURES



Indications

Les Couvertures bactériostatiques doivent être désinfectées après usage notamment après avoir été souillées par du sang, de l'urine, des selles ou des vomissements.



Justifications

Le nettoyage et la désinfection des couvertures bactériostatiques visent à éliminer les germes et micro-organismes pathogènes présents.



Nombre de SP : 1



Matériels

- Gants usage unique.
- 1 sac hydrosoluble.
- Spray détergent désinfectant
- lavettes
- 1 machine à laver (CSP).



Mise en œuvre

A

STOCKAGE DES COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES SOUILLEES



- Nettoyer si besoin la couverture en éliminant les souillures à l'aide de lavette et de spray détergent désinfectant.
- La mettre dans un sac hydrosoluble.



B

NETTOYAGE DES COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES SOUILLEES (CSP)



- Fermer **hermétiquement** le sac à l'aide du lien.
- Stocker le sac dans la zone dédiée à la navette
- Pour les CSP : le stocker dans la zone dédiée.



- Mettre les couvertures (maxi 2) dans le tambour de la machine à laver.



- Fermer la porte et mettre une dosette de lessive dans le compartiment supérieur droit.
- Programmer **un cycle à 60° avec un essorage à 1000 tours/min** pour évacuer l'eau de la surface de la couverture.

C

SECHAGE DES COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES



- A la fin du cycle de lavage, mettre les couvertures (maxi 2) dans le tambour du sèche-linge.
- Sélectionner un programme à **60° pendant 30 min.**
- Lancer le cycle
- A la fin du cycle, sortir et plier les couvertures.

