

MISE EN ŒUVRE DU KIT RISQUES INFECTIEUX AVEC COMBINAISON



Indications

Les kits individuels doivent être utilisés par chaque secouriste dans le cadre d'une intervention présentant des risques infectieux (Covid19, méningite...) ou une insalubrité environnementale importante.

Le masque chirurgical est destiné à être porté par la victime (et son entourage en cas d'atteinte infectieuse) afin qu'elle ne puisse pas projeter par sa salive et sa toux des gouttelettes infectées.



Justifications

Le kit risques infectieux permet de fermer les portes d'entrée des germes (voies respiratoires et cutanées) présents lors des interventions SUAP et tout particulièrement en cas de haut risque infectieux (Covid, méningite, tuberculose...).



Nombre de SP : 1



Matériels

Les kits risques infectieux sont présents dans les agrès SSUAP à raison d'un kit par SP



4

Chaque kit individuel comprend :

- 1 combinaison jetable (1);
- 1 masque chirurgical pour la victime (2);
- 1 masque FFP2 pour le secouriste (3);
- 1 paire de lunette de sécurité (4);

1

3

2



Mise en œuvre

Les kits sont portés sur ordre du chef d'agrès, sur consigne du CODIS, sur consigne opérationnelle temporaire ou après demande du médecin régulateur.

A

MISE EN PLACE DU KIT



- Au préalable, se laver les mains avec du gel hydro alcoolique puis enfiler des gants ;
- Ouvrir le kit individuel et vérifier l'intégrité des éléments ;
- Réserver le masque chirurgical pour la victime ;
- Placer le masque FFP2 sur le visage en vérifiant sa position correcte au niveau de la pince du nez.



- Placer et ajuster les lunettes.

Ce modèle de lunettes permet une protection optimale des contacts potentiels



- Déplier la combinaison ;
- Ouvrir le zip ;
- Enfiler les jambes, attention au passage des effets chaussants (inutile de les quitter) ;
- Enfiler les bras ;
- Ajuster la capuche.

Pour les petites tailles, raccourcir les jambes en repliant la combinaison sur les membres inférieurs



- Relever le zip ;
- Ajuster la combinaison au niveau du visage ;
- Rabattre le couvre zip ;
- Ajuster les manches par-dessus les gants au niveau des poignets.




B

RETRAIT ET ELIMINATION DU KIT



- Ouvrir la fermeture zippée ;
- Enlever la capuche en tirant sur les parois extérieures.

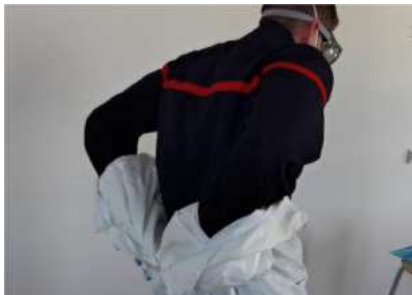

- Dégarnir le haut des épaules **en roulant la combinaison sur elle-même par l'extérieur.**

Cette technique permet « d'enfermer » les particules potentiellement contaminantes à l'intérieur de la tenue roulée sur elle-même.



- Enrouler la combinaison jusqu'en bas ;
- Dégager les pieds ;
- Mettre dans un sac DASRI la combinaison.



- Retirer les gants, les jeter dans un sac DASRI puis se laver les mains avec du gel hydro alcoolique ;
- Retirer les **lunettes** par l'élastique puis les placer dans un autre sac ou celui du kit RI pour une **décontamination ultérieure** ;
- Retirer le masque par les élastiques en veillant à ne pas toucher le visage puis le placer dans le sac.



- Réaliser un lavage soigneux des mains à l'aide du gel hydro alcoolique.



Risques et contraintes

- Le temps de port du masque FFP2 est au maximum de 6 heures consécutives.
- Tout masque FFP2 présentant des signes d'humidité doit être changé.
- En cas d'incident (déchirure de la combinaison, des gants ou perte du masque), rendre compte au CODIS qui préviendra l'astreinte cadre santé de la SDS pour une évaluation des risques.
- En cas de doute sur la contamination au déshabillage d'un effet textile SPF1 ou TSI, ce dernier devra être lavé à 60° en machine (dans un sac hydrosoluble si lavage à domicile). La procédure est détaillée dans la FT 14.11.



Points clés

- La tenue est portée sur ordre du chef d'agrès en fonction de l'analyse des risques dans le cadre d'un contrôle croisé
- Le retrait doit éviter une contamination de la TSI portée sous la combinaison ou des mains du secouriste.



Entretien - Maintenance

- L'ensemble des matériels des kits risques infectieux potentiellement contaminés est à éliminer dans les sacs DASRI après usage, sauf les lunettes qui doivent être retournées à la PUI par la navette pour être décontaminées.
- Les matériels non utilisés des kits doivent être retournés à la PUI par la navette pour reconditionnement.
- Vérifier la date de péremption marquée sur le kit, si celle-ci est dépassée remplacer le kit complet en le renvoyant à la PUI départementale par le biais de la navette.



Lien vers la vidéo – Mise en œuvre Kit risque infectieux

