

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU MATERIEL SUAP

Indications

Nettoyage et désinfection pour toute intervention SSUAP en VSAV/VPI/VPS :

- Du matériel médicosecouriste réutilisable avant leur rangement dans les sacs (stylo lampe, pince de saturation, brassard du tensiomètre...);
- Des équipements utilisés (attelles, MID, couverture bactériostatique...);
- Des surfaces de petites tailles.



Justifications

Le nettoyage et la désinfection visent à éliminer les germes et micro-organismes pathogènes présents sur le matériel utilisé à l'issue de toute intervention SSUAP.

Nombre de SP : 1

Matériels

- Spray décontaminant / désinfectant ;
- Lavettes à usage unique.

Mise en œuvre



- Mettre les gants et les lunettes de protection.



Les EPI pour la désinfection sont à adapter en fonction du contexte infectieux ou épidémique (masque chirurgical ou FFP2).

Porter impérativement un kit Risques infectieux si suspicion de contamination infectieuse du matériel.



- Appliquer uniformément par pulvérisation sur les surfaces à désinfecter puis étaler à l'aide d'une lavette. La mousse s'estompe facilement pour faciliter l'essuyage.



- Essuyer à l'aide d'une autre lavette si nécessaire.
- Ne pas rincer.



- Remettre le matériel en place.
- Jeter le matériel de nettoyage usagé dans le sac noir **sauf suspicion de contamination (sac DASRI)**.



Risques et contraintes

- Les désinfectants peuvent être irritants pour la peau et les yeux. Il est donc nécessaire de porter des gants à usage unique et des lunettes de protection ;
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment sous l'eau et consulter un médecin ;
- Ne jamais pulvériser sur du matériel électrique.



Points clés

- La vérification du fonctionnement du matériel est indispensable avant sa remise en service ;
- L'agent doit porter les équipements de protection adaptés ;
- Tri des déchets. (FT 14.6)

